



# Adaptación de los principales productos en ortésica seriada.

*19 de febrero de 2025*

**Antonino Vázquez**

Delegado Visita Médica

antoninovazquez@orliman.com

## TRONCO

- *Área cervical*
- *Área dorsolumbar*
- *Área sacrolumbar*

## MIEMBRO SUPERIOR

- *Mano muñeca*

## MIEMBRO INFERIOR

- *Rodilla*
- *Tobillo/ pie*

## PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

- *Productos recomendados*

## APP ORTOCODE

## TALLER PRÁCTICO





# GAMA TRONCO



ZONA CERVICAL

## COLLARINES

¿Qué productos podemos encontrar en nuestro catálogo?

Blandos



CC2108

Espuma de poliuretano



Descargan peso cabeza

Semirrígidos



CC2208



CC2300



CC2400

Polietileno



Mayor seguridad y confort

Rígidos



CC2503



CC2600

Refuerzos termoplásticos/  
metálicos



Inmovilización



ZONA DORSOLUMBAR

The image shows a physiotherapist in a blue shirt examining the back of a patient. The patient is wearing a white strap across their back. The physiotherapist's hands are placed on the patient's back, one near the shoulder and the other lower down. The background is a plain, light-colored wall. An orange banner at the bottom of the image contains the text "ZONA DORSOLUMBAR" in white, bold, sans-serif font.



# GUÍA DE CONSEJO ORTOPÉDICO FAJAS DORSOLUMBARES

ACTIVIDAD

Dorsalgia



E-240

Debilidad muscular / Espondilólisis / Espondilolistesis / Discopatías



LT-320  
OTL000A



EV+EV-203  
OTL000A

Osteoporosis



TC300  
OTD020E


Fractura / Fisura / Aplastamiento / Acuñaamiento



J001G  
J001AG  
J001  
J001A  
OTD080C



CT1001  
CT1002  
OTD020B

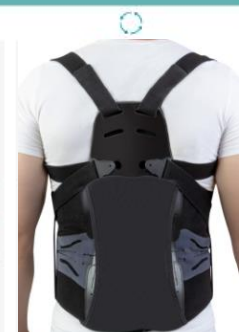

NOVEDAD



E-250



ET-220



FX-213  
OTD000A  
FX-215  
OTL000B



BOD-100  
BOD-100T  
BOD-100TVL  
OTD020E



EV+EV-203+EVM  
OTD020E



TC201  
OTD020D



TLS0-B  
OTD020E

CONTENCIÓN

CONTENCIÓN

CONTENCIÓN

# ZONA SACROLUMBAR



# GUÍA DE CONSEJO ORTOPÉDICO **FAJAS SACROLUMBARES**

ACTIVIDAD +  
-

Lumbalgia leve Debilidad muscular / Preventiva			Lumbalgia grave Lumboartrosis / Espondilólisis / Espondilolistesis / Discopatías			Fractura / Fisura Aplastamiento / Acuñaamiento			Otros
									
LT-300	T-420	9203	T-421	LTG-305 LTG-375	SD100	LTG + EVM	EV + EVM	SD103 SD104	OMT601 OMT611 A-131
									
LT-280 LT-281	LT-300 LT-301 LT-310	EV-200 EV-300 EV-201 EV-301	FX-211 FX-212 FX-214	KC201	LSO-B LSOC-B	SD102			

CONTENCIÓN +  
-



MIEMBRO SUPERIOR



# MANO

¿Qué productos podemos encontrar en nuestro catálogo?

MUÑECA PULGAR

## PREVENTIVO

Prevención lesiones / Inestabilidades / Rehabilitación

THERMOMED® SMART



PULGAR

Prevención lesiones / Inestabilidades / Rehabilitación

ELASTIC



THERMOMED® SMART



MUÑECA

Prevención lesiones / Inestabilidades / Rehabilitación

ELASTIC



THERMOMED® SMART



## CRÓNICO

Tendinitis / Artrosis / Quervain

MANUTEC® ELÁSTICAS



OSU000A

MANUTEC® FIX AMBIDIESTRA



OSU000A

THERMOMED® SMART



Tendinitis / Rizartrosis

MANUTEC® ELÁSTICAS



OSD000A

MANUTEC® FIX AMBIDIESTRAS



OSD000A

MANUTEC® FIX RIZART PLUS



OSD000A

Tendinitis / Artrosis / Síndrome Túnel Carpiano

MANUTEC® ELÁSTICAS



OSN000A

THERAGO®



OSN000A

## TRAUMÁTICO

Esguince Muñeca + Pulgar Fractura y Postoperatorios

MANUTEC® FIX AMBIDIESTRAS



OSU000A

MANUTEC® SEMIRRÍGIDAS



OSU000A

Esguince Pulgar

MANUTEC® FIX AMBIDIESTRAS



OSD000A

MANUTEC® SEMIRRÍGIDAS



OSD000A


Esguince Muñeca

MANUTEC® FIX AMBIDIESTRAS



OSN000A

MANUTEC® SEMIRRÍGIDAS

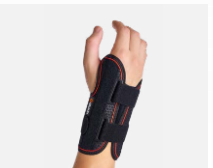

OSN000A

A photograph showing the lower legs and feet of a person running up a set of stone stairs. The person is wearing dark blue athletic shoes with bright yellow-green soles. The background is slightly blurred, showing the stone steps and a metal railing.

MIEMBRO INFERIOR



# RODILLA

## ¿Qué productos encontramos dentro de nuestro catálogo?

### PREVENTIVO

Traumatismos / Inestabilidades leves / Procesos inflamatorios

THERMOMED® SMART



THERMOMED® SMART



ELASTIC



### CRÓNICO

Tendinopatía / Síndrome Rotuliano / Artrosis / Condromalacia

3 TEX®



OIR010B



OIR010B

THERMOMED® SMART



OIR010B



OIR010B

RODISIL®



OIR010B



OIR010B

### EVOLUTIVA

### TRAUMÁTICO

Esguince Moderado-Grave / Fracturas / Post(Qx)

THERAGO®



OIR010B



OIR020A

3 TEX®



OIR020B

### INMOVILIZADORES RODILLA



OIR020A



# TOBILLO-PIE

¿Qué productos encontramos dentro de nuestro catálogo?

## PREVENTIVO

Traumatismos / Inestabilidades leves /  
Procesos inflamatorios

ELASTIC



SPORT



THERMOMED®  
SMART



ELASTIC



## CRÓNICO

Artrosis y Artritis /  
Tendinitis, bursitis

SPORT



TOBIPLUS®



## TRAUMÁTICO

Esguince Moderado-Grave /  
Fracturas / Post(Qx)

THERMOMED®  
SMART



TOBIPLUS



OIT050B

OIT050B

WALKERS



OIT030A



# PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

# ¿Qué productos encontramos dentro de nuestro catálogo?



**Soporte de hombro con cincha de brazo y antebrazo Neuroconex®**

**Soporte de hombro con cincha de antebrazo Neuroconex®**

**Férula multiposicional**

**Antiequino Boxia®**

**Antiequino Boxia® Plus**

**Casco protección craneal**

**Férulas en termoplástico inmovilizadoras**

**Férulas en termoplástico articuladas**

**Férulas en termoplástico antiespástica**

**Férula aluminio maleable**





## ORTESIS ANTIEQUINO

Rancho de los Amigos



TP-2102D ●

TP-2102I ●

Código: 06 12 06 OIT060A

- **Mantienen el pie a 90° pero no controlan el varo del pie.**
- **Impide que la rodilla claudique en flexión en la fase de apoyo**

### Características

- Ortesis de polipropileno de alta densidad inyectado.
- Su diseño aporta elasticidad a nivel del tendón de Aquiles permitiendo unos movimientos de flexión plantar, dorsal durante la marcha, evitando la caída del pie, especialmente en la fase de balanceo, manteniendo el pie a 90°.
- Ligeramente termomaleable.
- Accesorio almohadilla empeine antiequino.

TALLAS	Nº CALZADO	ALTURA / cm /
1	35-37	29
2	37-39	32
3	39-41	34
4	41-44	39



Disponible talla pediátrica



## SOPORTES ANTIEQUINO BOXIA Y BOXIA PLUS



AB01 ●

AB100 ●

Código: 06 12 06 OIT060D

- Indicada en pacientes con déficit en el movimiento de flexión dorsal.

### Características

Compuesto por:

- Una pieza supramaleolar textil microperforada y transpirable que envuelve el tobillo. Dispone de una almohadilla posterior que abraza el tendón de Aquiles y proporciona máxima comodidad, distribuye la presión, además de disponer de puntos de relieve con efecto masaje en las partes blandas. Posibilita la regulación del anclaje central en función del perímetro del tobillo, garantizando que su posición siempre es la más adecuada para cada paciente.
- 1 Elástico de tracción.
- 4 Pares de ganchos en "S".
- Lengüeta con gancho antideslizante.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	14-20
2	20-26
3	26-32



Disponible talla  
pediátrica



Boxia®  
Video



Boxia®Plus  
Video





## Neuroconex

Soporte de hombro con cincha de brazo/ y antebrazo

94303 D/I /94304 D/I


● Código: 06 06 27 OSH000B

### Indicaciones

- Pacientes con hemiparesia o hemiplejía.
- Lesiones neurológicas de miembro superior.
- Lesiones del plexo braquial con parálisis de hombro y brazo.

### Características

- Foam transpirable en velour por su cara externa y forro interior de tejido de panal.
- Hombro reforzada con alma de termoplástico.
- Acolchado en la zona de la hebilla anterior.

TALLAS	1	2	3	CIRCUNFERENCIA EN CM 
PERÍMETRO CM	22,5-28	28-34	34-40	

## ORTO-code by ORLIMAN

Orto-code es la aplicación que identifica de manera rápida y sencilla todas las prestaciones ortoprotésicas del SNS.

Cuenta con 3 métodos de **búsqueda**: por **código**, por **patología/uso** o por **producto**.

Aparecen de manera sencilla todos los **productos** del catálogo de Orliman que tienen código ortoprotésico asociado.

Está disponible en **Google Play**, en **App Store** y en **Versión de escritorio**.



XVI edición Jornadas de Actualización  
en Prótesis y Ortesis Granada 19 al 21 febrero

**ORTOGRA 2025**



# Gracias por vuestra atención

**Antonino Vázquez**

Delegado Visita Médica

[antoninovazquez@orliman.com](mailto:antoninovazquez@orliman.com)

